



VAN DER MARK ZORGHULPMIDDELEN

M O N T E R E N



STAPPEN



DEMONTEREN HOOG/LAAG BED - VAN DER MARK AD-SYSTEMEN

In deze handleiding staat ugelegd hoe u het bed in 10 stappen kunt monteren. Graag stap voor stap uitvoeren middels de handleiding welke na deze pagina begint en met afbeeldingen wordt toegelicht.

1. FRAME

Schuif het schot in het frame

2. VLEUGELMOEREN

Schroef de 2 moeren vast

3. KANTELEN

Kantel het bed op de wieltjes

4. 2 DELEN

De voor-en achterkant

5. IN ELKAAR SCHUIVEN

Schuif de delen in elkaar

6. STEKKERS

Sluit de stekkers aan

7. PLANKEN

Schuif de planken in de pin

8. TEGEN ELKAAR SCHUIVEN

Schuif de delen nu helemaal in elkaar


9. VLEUGELMOEREN

Schroef alle moeren vast

10. PAPAGAAI

Til de papagaai in het bed

STAP 1

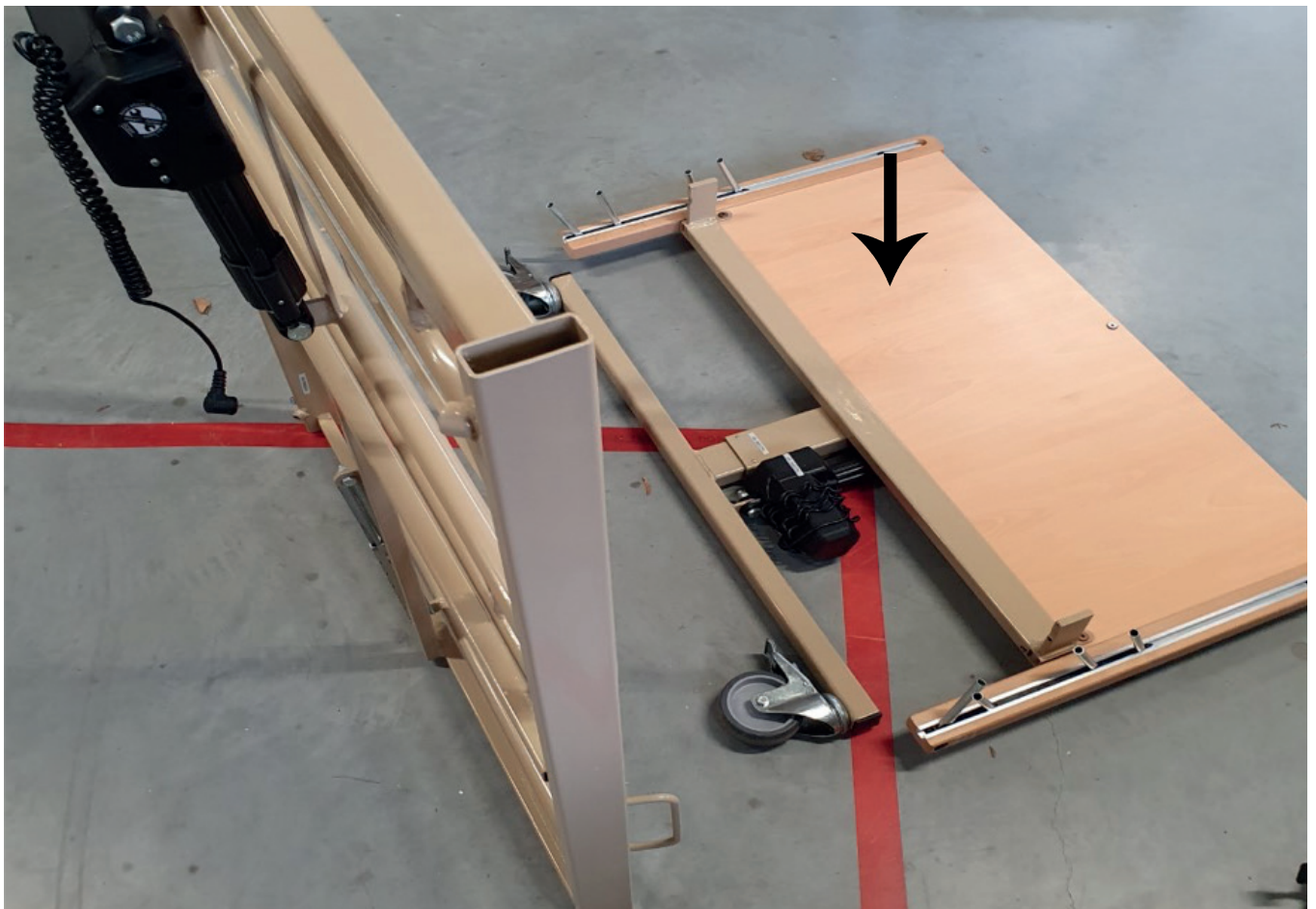


Stap 1:

Allereerst kunt u het schot in de rails van het frame tillen. Doe dit aan beide kanten. Nu heeft u 2 gelijke onderdelen; de voor- en achterkant van het hooglaadbed.



STAP 2

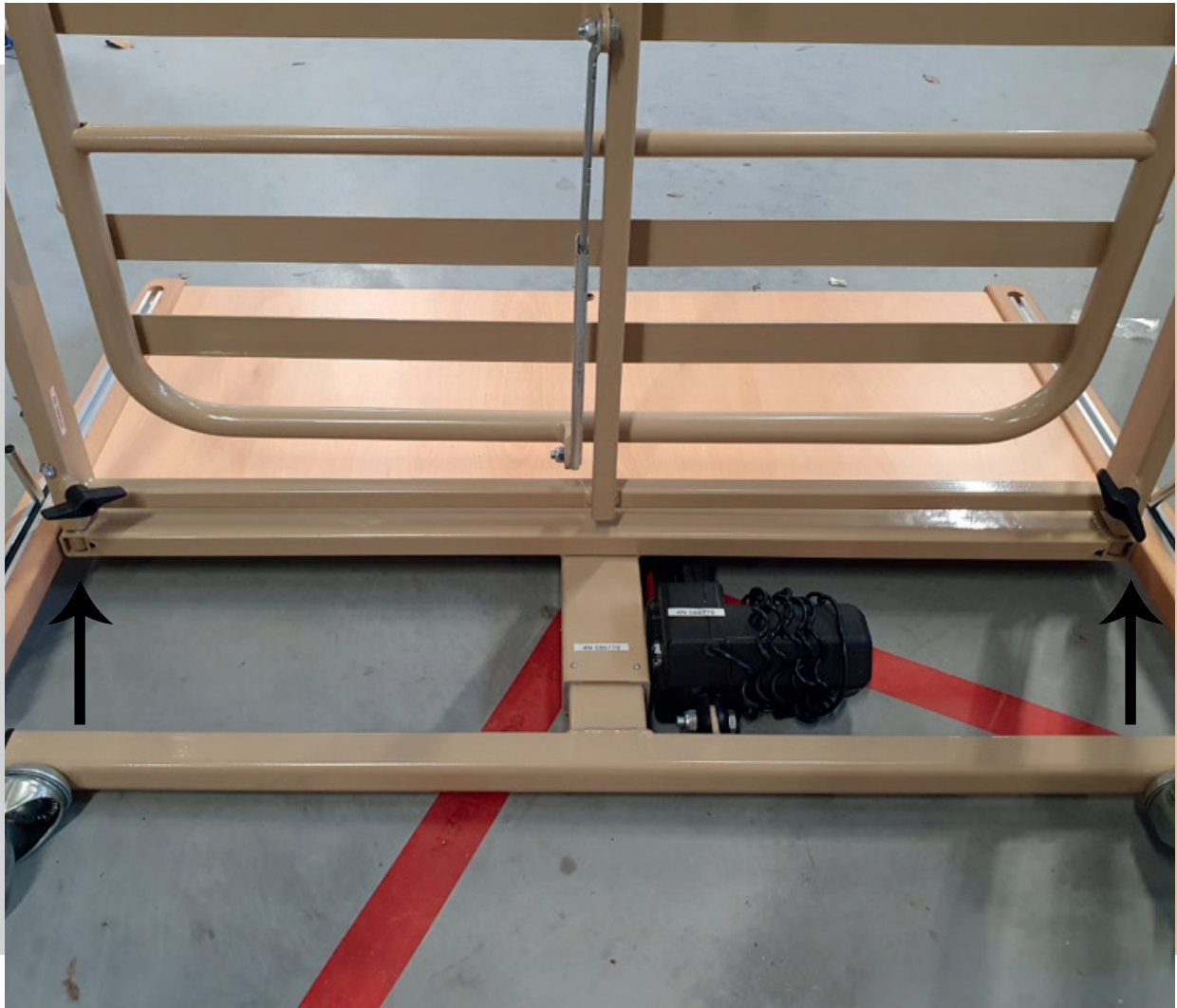

Stap 2

Als u stap 1 heeft uitgevoerd kun u de vleugelmoeven van de onderdelen vastschroeven (zie de pijltjes op de foto). Deze schroeven zitten er al op de juiste plek in, u hoeft ze dus enkel vast te draaien.

STAP 3



Stap 3

Het handigste is om het bed te gaan kantelen, zodat de wieltjes op de grond komen te staan. Wanneer u uw voet op de juiste manier op het schot plaatst (zie afbeelding hierboven) kunt u het bed veilig op de wielen kantelen.


STAP 4



Stap 4

Wanneer u stap 2 en 3 juist heeft uitgevoerd, houdt u 2 delen van het bed over zoals op de afbeelding hiernaast aangegeven.



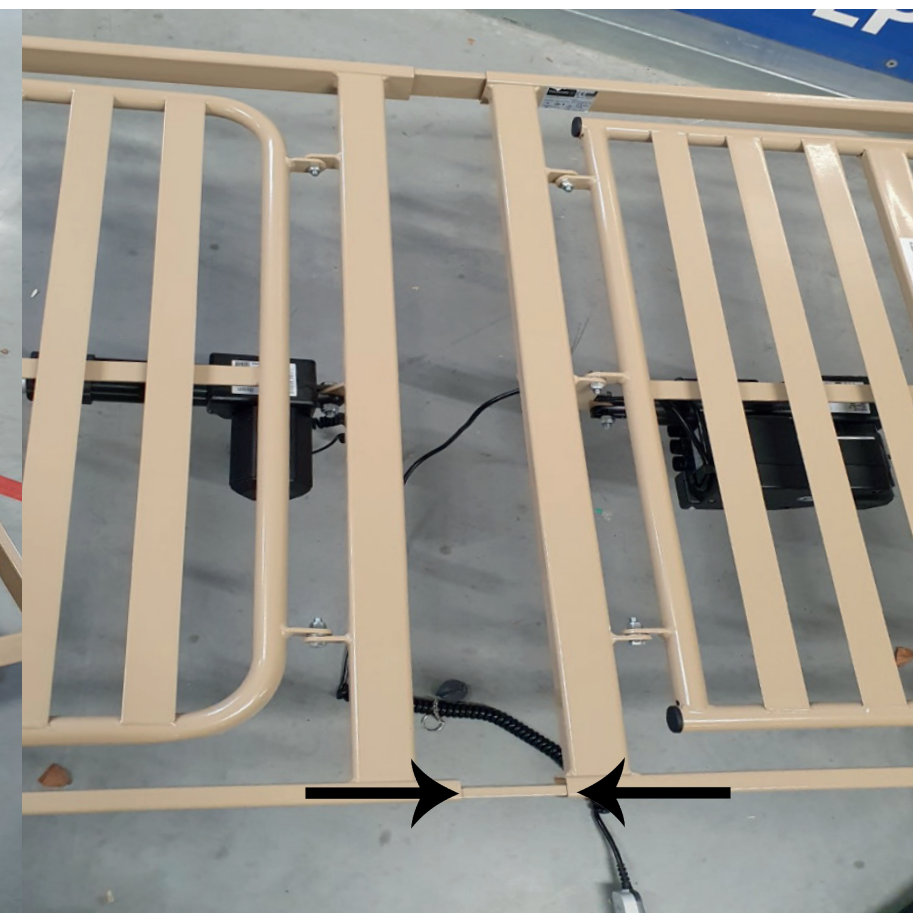


Stap 5

Nu het bed op de wieltjes staat, kunt u de 2 onderdelen van het bed rustig in het midden tegen elkaar aan schuiven. Zodat ze in het midden nog ongeveer 10 cm uit elkaar staan. Zoals op de foto hiernaast is aangegeven.

STAP 5

STAP 6

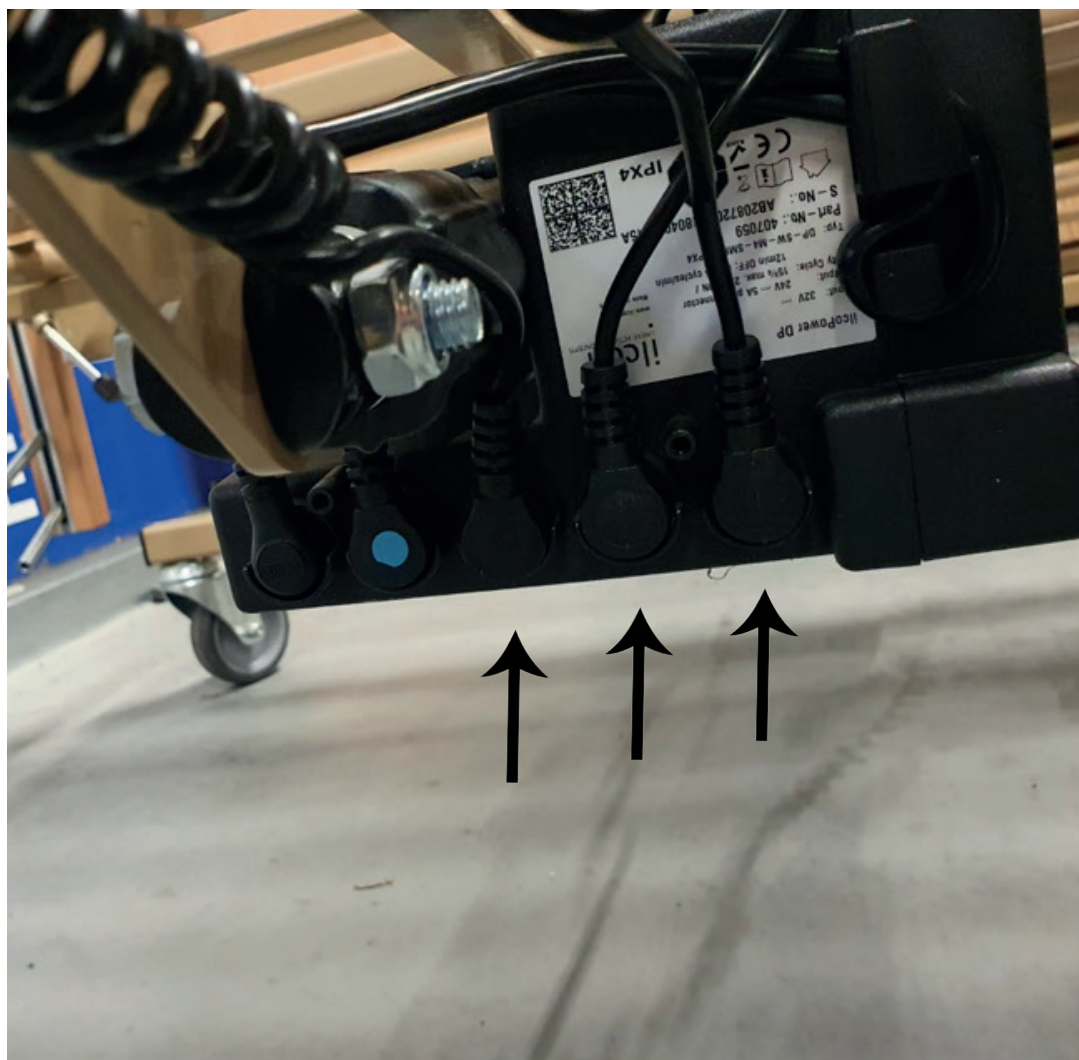

Stap 6

Nu de 2 delen in elkaar zijn geschoven kunnen de stekkers aangesloten worden aan de hoofdmotor. In de hoofdmotor zitten in totaal 5 stekkers. Slechts 3 hiervan hoeft je zelf aan te sluiten. Met pijltjes op de afbeelding hierboven staat aangegeven welke 3 stekkers dat zijn. De stekker van de kleine motor moet in de aansluiting 3. De stekkers van de motoren op de schotten moeten in aansluiting 4 en 5. De kabels van de handbediening en van de hoofdmotor zitten namelijk al aangesloten (dit zijn de 2 linkse stekkers). Let op: de stekkers kunnen er soms wat moeizaam in gaan.

STAP 7



Stap 7

Als de stekkers erin zitten kunt u de planken erin gaan schuiven. Dit doet u door de planken richting het schot te schuiven, zoals op de afbeelding hierboven met pijltjes is aangegeven. De pinnen schuiven dan in de planken.



STAP 8

Stap 8


Zodra u de planken erin heeft geschoven kunt u het midden van het bed helemaal tegen elkaar aan schuiven.

STAP 9

Stap 9

Onder het bed zitten in totaal 6 vleugeldoortjes. Allereerst schroeft u de middelste 2 vleugeldoortjes van het bed vast. Daarna de andere. De vleugeldoortjes zitten al op de juiste plek, u hoeft ze dus alleen maar vast te draaien.

Let op: op de volgende pagina vindt u de laatste stap (stap 10) voor het monteren van het hooglaagbed.

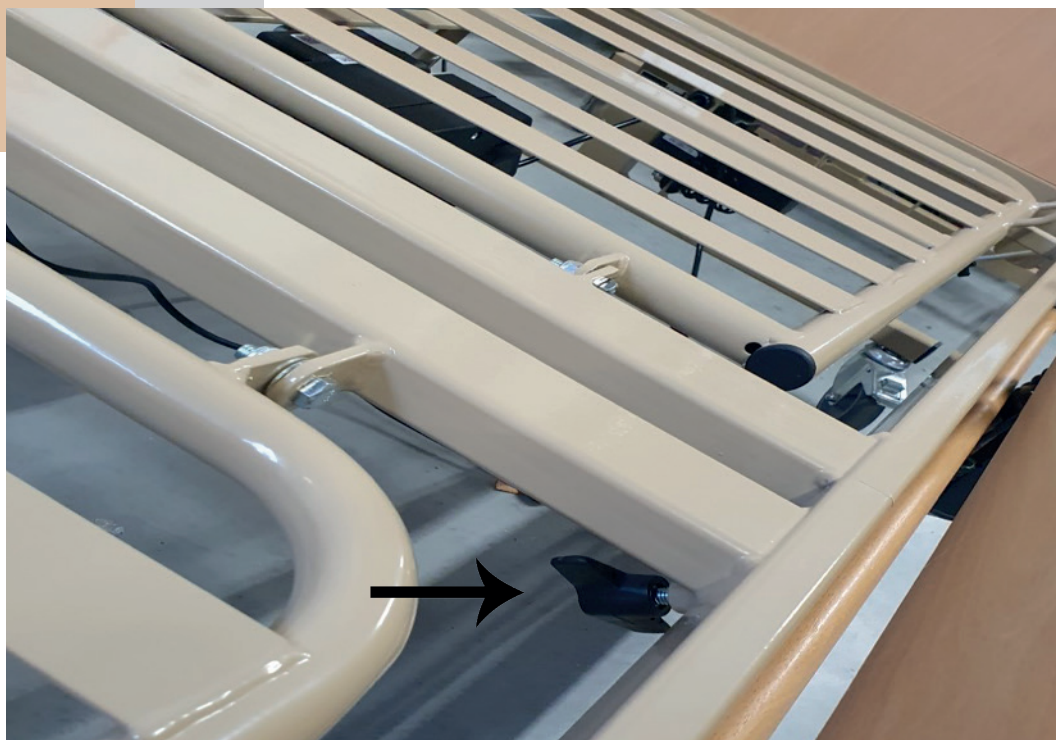

STAP 10

Stap 10

Ten slotte kunt u de papagaai in het bed tillen. Nu kunt u het hooglaagbed gaan gebruiken en bedienen door middel van de knoppen op de handbediening. Als alle knoppen op de handbediening werken heeft u het bed op de juiste manier gemonteerd. Voor verdere instructies en informatie verwijzen wij u naar de handleiding. Heeft u verder nog vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 0186-573585.



EINDE HANDLEIDING
MONTEREN
HOOGLAAGBED

EINDE HANDLEIDING