

## **Gebruiksaanwijzing voor Badplank**

### **Algemene gebruiksvoorschriften**

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 190 kg zijn.
3. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
4. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
5. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.
6. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

### **Instructies badplank**

1. Zet de poten in het boord.
2. Positioneer het boord over het bad en stel de poten op de juiste breedte.
3. Draai de poten vast door middel van draaien (met de klok mee).
4. Test of het boord stabiel ligt.
5. Controleer regelmatig of de poten vast zitten.

