

## Gebruiksaanwijzing voor bedheffer/papegaai

### Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Alleen gebruiken op vlakke en stevige ondergrond.
3. De bedheffer/papegaai is alleen bedoeld voor het zelfstandig oprichten op bed of in een stoel.
4. Het is ten strengste verboden om het artikel te gebruiken voor een transfer van de ene plaats naar een andere.
5. Let op voldoende afstand bij in hoogte verstelbaar bed of stoel.
6. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 80 kg zijn, dit betekent dat het voor patiënten tot 130 kg bruikbaar is.
7. Berg het artikel niet buiten op. Berg het artikel niet op in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
8. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
9. Controleer voor gebruik of de triangel correct bevestigd is en niet versleten.
10. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.
11. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

### Plaatsing en afstelling

1. Plaats het artikel achter het hoofdeinde van het bed of aan het rugdeel van de stoel. Nooit de bedheffer/papegaai aan de zijkant van het bed of rolstoel zetten.
2. Afstelling van de triangel geschiedt door middel van de metalen pin aan de bovenzijde van het frame in het gewenste gat te plaatsen. Zorg er voor dat wanneer de triangel vastgepakt wordt en hieraan opgetrokken wordt, deze verticaal onder het frame blijft (zie afbeelding hieronder).
3. Vervolgens kan de hoogte van de triangel aangepast worden, door de lengte van de lus te verlengen of verkorten.

