

Gebruiksaanwijzing voor Bedtafel

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing door voor gebruik.

1. Gebruik het artikel nooit als het maximumgewicht wordt overschreden. Dit maximum gewicht staat aangegeven op het artikel.
2. Controleer voor gebruik of het artikel niet versleten is en dat alle schroeven vast zitten.
3. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is.
4. Berg het artikel niet buiten op. Berg het artikel niet op in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
5. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
6. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen.

In hoogte verstellen:

1. Draai de knop, aan de binnenzijde, aan de dieptekant van het tafelblad, los totdat de tafel in hoogte te verstellen is.
2. Stel de tafel in op de gewenste hoogte.
3. Draai de knop vast totdat de tafel vast staat en niet meer beweegt in de hoogte.

Tafelblad kantelen:

1. Draai de knop aan de buitenzijde van het tafelblad, in het verlengde van de tafelbreedte, los totdat het blad beweegbaar is.
2. Stel het blad op de gewenste hoek in.
3. Draai de knop vast totdat het blad niet meer beweegbaar is.

N.B. zet de wielen op de rem indien de bedtafel op de gewenste plaats staat.

