

Gebruiksaanwijzing voor Bedverhogers

Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Alleen gebruiken op vlakke en stevige ondergrond.
3. De bedverhogers zijn alleen bedoeld voor het verhogen van een bed of stoel.
4. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 150 kg per poot zijn.
5. Berg het artikel niet buiten op. Berg het artikel niet op in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
6. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
7. Controleer voor gebruik of de verhogers zich op de juiste plaats bevinden en niet versleten zijn.
8. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.
9. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

Installatie van de verhogers:

1. Plaats onder elke poot van het bed of de stoel een verhoger.
2. In de verhogers is een motief gemaakt. Kies het juiste motief bij de poot en zet de poot daarin.

