

## Gebruiksaanwijzing voor Dekensteun

### Algemene gebruiksvoorschriften

1. Stel de dekensteun in op de gewenste hoogte, door middel van de klembevestigingen te verwijderen en de boog in de gewenste afstand te plaatsen. Plaats vervolgens de klembevestigingen terug, beide op dezelfde hoogte. Let erop dat de klemmen juist rond de buis zitten.
2. Plaats de dekensteun met de niet-verstelbare kant aan de achterzijde onder het matras, en onder de deken.
3. Geen extra gewicht uitoefenen op de dekensteun.
4. Controleer voor gebruik of het artikel niet versleten is en of alle schroeven vast zitten.
5. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is.
6. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
7. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
8. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen.

