

Gebruiksaanwijzing voor douchestoel

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing door voor gebruik.

1. Gebruik het artikel uitsluitend op een vlakke en vaste ondergrond.
2. Gebruik het artikel nooit als het maximumgewicht wordt overschreden. Dit maximum gewicht staat aangegeven op het artikel.
3. Controleer voor gebruik of het artikel niet versleten is en of dat alle schroeven vast zitten.
4. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is.
5. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
6. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
7. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen

