

Gebruiksaanwijzing voor Draaischijf

Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Alleen gebruiken op vlakke en stevige ondergrond.
3. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 125 kg zijn.
4. Berg het artikel niet buiten op. Berg het artikel niet op in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
5. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
6. Controleer voor gebruik of de draaischijf en niet versleten is.
7. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.
8. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

In gebruikname

1. Positioneer de draaischijf met de rubberen doppen naar beneden op de gewenste plaats.
2. De draaischijf kan in beide richtingen draaien.
3. Niet gebruiken zonder hulp.