

## Gebruiksaanwijzing voor Infuusstandaard

### Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. De infuusstandaard is niet bedoeld als loophulpmiddel.
3. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 16 kg zijn en per haak maximaal 4 kg.
4. Controleer regelmatig de hoogteverstelling op de correcte werking.
5. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
6. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
7. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.

### Hoogteverstelling

1. Draai de knop aan de stang los totdat de bovenste buis beweegbaar is.
2. Stel de standaard in op de gewenste hoogte.
3. Draai de knop vast totdat de bovenste buis niet meer beweegbaar is.

