

Gebruiksaanwijzing voor Rugsteun

Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 100 kg zijn.
3. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
4. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
5. Controleer het artikel voor gebruik op zichtbare beschadigingen.
6. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.
7. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

Instructies plaatsing en hoekverstelling

1. Plaats het hulpmiddel met de stoffen kant richting de rug van de patiënt.
2. Zorg dat de rugsteun niet weg kan glijden van het oppervlak.
3. Til de rugsteun kant op terwijl het frame tegengehouden wordt.
4. Houdt de rugsteun in de gewenste hoek.
5. Duw de stang naar beneden in de hoekverstelling, zodat de rugsteun blijft staan.
6. Controleer stabiliteit voor gebruik.

