

Gebruiksaanwijzing voor Toiletstoel

Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik de toiletstoel uitsluitend op een effen harde vloer.
2. Gebruik de stoel alleen binnenshuis.
3. De stoel is niet geschikt voor gebruik als douchestoel.
4. De patiënt kan niet rechtop op de voetsteunen staan, de stoel kan daardoor kantelen.
5. Gebruik de stoel niet voor patiënten die het maximum toelaatbaar gewicht overschrijden. De toiletstoel heeft een maximum toelaatbaar gewicht van 100 kg.
6. Controleer voor gebruik of het artikel niet versleten is en dat alle schroeven vast zitten.
7. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is.
8. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
9. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
10. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen.

Gebruik van een verrijdbare toiletstoel

1. Blokkeer de stoel met behulp van de remmen;
2. Verwijder de afdekplaat;
3. Klap de voetsteunen in;
4. Controleer of de emmer goed bevestigd zit en de deksel is verwijderd;
5. De patiënt kan plaats nemen, controleer eerst de remmen;
6. Klap de voetsteunen uit.

Gebruik van een vaststaande toiletstoel

1. Plaats de toiletstoel op de gewenste plaatst;
2. Verwijder de afdekplaat;
3. Controleer of de emmer goed bevestigd zit en de deksel is verwijderd;
4. De patiënt kan plaatsnemen.

