

Gebruiksaanwijzing voor Toiletverhoger

Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan indien de toiletverhoger wordt gebruikt om gebruikelijke toiletten in binnenruimtes te verhogen;
2. Overhellen naar één zijde veroorzaakt kans om te vallen. Naar voren en achteren bewegen is wel mogelijk;
3. Controleer of de toiletverhoger stabiel is;
4. Gebruik de toiletverhoger niet voor patiënten die het maximum toelaatbaar gewicht overschrijden. De toiletverhoger heeft een maximum toelaatbaar gewicht van 185 kg.
5. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is;
6. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
7. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen.

Installeer de toiletverhoger volgens onderstaand voorbeeld.

