

Gebruiksaanwijzing Transferplank/glijplank

Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik van dit product is alleen toegestaan in binnenruimtes.
2. Overschrijding van het maximaal toelaatbaar gewicht is niet toegestaan. De totale belasting mag maximaal 190 kg zijn.
3. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
4. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
5. Bij eventueel defect aan het hulpmiddel dient u direct contact op te nemen met Van der Mark A.D. Systemen.
6. Gebruik het artikel niet indien het versleten is.

Instructies transferplank

1. Gebruik deze plank niet zonder training van een zorgmedewerker.
2. In een aantal gevallen is het niet toegestaan om zonder zorgmedewerker dit hulpmiddel te gebruiken.
3. Plaats de vlakke kant naar beneden.
4. Plaats een kant onder het lichaam van de patiënt en het andere eind op het gewenste vlak waar de patiënt naartoe wilt.
5. Test de stabiliteit van de plank.
6. Zorg dat de plank het totale gewicht tijdens de hele transfer ondersteund.
7. Bij gebruik zonder kleren kan er het beste een handdoek op de plank geplaatst worden.