

## Gebruiksaanwijzing Luchtring Zitkussen

### *Verhuurartikel*

**1. Gebruik van de luchtring:**

De luchtring is een ronde luchtband ter ontlasting van het staartbeen.  
(b.v. na een operatie)

**2. De luchtring gebruiksklaar maken:**

De luchtring is voorzien van een metalen ventiel. Draai de schroef op het ventiel enigszins los en blaas lucht in de luchtring. Is de ring voldoende met lucht gevuld, draai dan tijdens het blazen het ventielschroefje weer vast.

**3. Onderhoud van de luchtring:**

U kunt de luchtring schoonmaken met een lauw sopje.  
Ga zorgvuldig met de luchtring om.

**4. Na gebruik:**

Hebt u de luchtring niet meer nodig. Bel het bovenstaande nummer dan word de luchtring weer opgehaald.

**5. Heeft u vragen:**

Belt u gerust naar Van der Mark Anti Decubitus Systemen.

