

Handleiding voor uw Klassieke relaxfauteuil

Bedienungsanleitung für Ihren Klassik Relaxsessel



Handleiding voor het gebruik van uw relaxfauteuil met sta-op systeem

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een fauteuil met sta-op systeem. Na het lezen van deze handleiding wensen wij u veel relaxcomfort en gemak van uw fauteuil. Leest u dus voor het gebruik deze handleiding in zijn geheel aandachtig door.

1. Eerste gebruik van de fauteuil

1.1 Plaatsen

- De fauteuil dient op een vlakke vloer geplaatst te worden. Houdt u bij het verplaatsen van de fauteuil rekening met de vloer. Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de beschadiging aan de vloer veroorzaakt door de fauteuil. Til uw gekozen fauteuil nooit aan de armen op. Bij verplaatsen van de fauteuil tilt u deze aan de onderzijde van de armen of het zijpaneel op.
- Heeft u gekozen voor een fauteuil met accu dan dient u nadat de fauteuil is uitgepakt deze op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig opgeladen. Bij punt 3.3 leest u hoe u de accu kunt opladen.
- Is uw elektrisch verstelbare fauteuil voorzien van een trafo dan sluit u deze rechtstreeks aan op de fauteuil waarna u de stekker in het stopcontact steekt.
- Voorkom dat u uw fauteuil in direct zonlicht plaatst of nabij een openhaard / houtkachel in verband met verkleuring of vervorming van de fauteuil


1.2 Veiligheid

Let er bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld kunnen raken tussen de bewegende delen van de fauteuil. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of er mee spelen.

2. Bediening van de fauteuil

Twee motorig relaxsysteem

Indien u gekozen heeft voor een relaxfauteuil met twee motoren bediend u deze met de handbediening. Als u in de neutrale positie op knop A drukt en deze vasthoudt, gaat de rug achterover. Met knop B bedient u afzonderlijk van de rug de voetensteun. Om de rug weer in de neutrale positie te zetten drukt u op knop C. Om de voetensteun weer in te klappen drukt u op knop D. Voor het bedienen van de sta-op hulp gebruikt u knop D. Als u weer terug wilt naar de neutrale stand vanuit de sta-op positie drukt u op knop B.

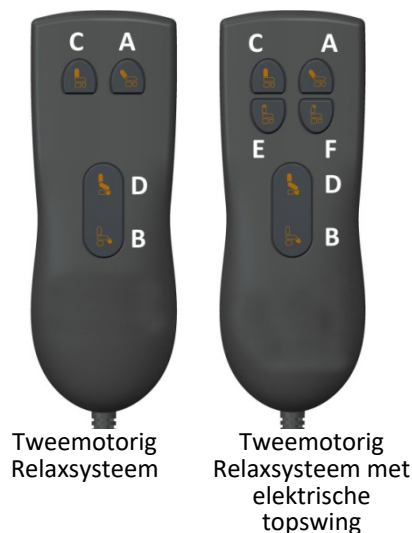

BELANGRIJK: Zorg er altijd voor als u in de fauteuil gaat zitten dat deze of geheel in de neutrale stand staat (met de zijden op de grond) of wanneer de fauteuil geheel in zijn sta-op stand staat. Gaat u niet in de fauteuil zitten als deze nog een stuk boven de grond “zweeft”. Dit leidt onherroepelijk tot schade aan het systeem en motoren!



2.3 Topswing

2.3.1 Topswing manueel

Uw fauteuil is ook voorzien van een topswing. Deze verstelbare hoofdsteen kunt u, als u in de fauteuil zit, met beide handen achter uw hoofd naar uw toe trekken. De topswing is traploos. Als u de topswing niet meer wilt gebruiken duwt u deze weer met twee handen eenvoudig terug. Door het gebruik van de topswing rekt de bekleding aan de achterzijde van de fauteuil iets op. Dit is normaal en niet te voorkomen.

2.3.2 Topswing elektrisch

Wanneer u bij uw aankoop gekozen heeft voor een elektrische topswing wordt deze bewogen door een motor. Deze bedient u met uw handbediening. In dat geval is uw handbediening voorzien van een extra knop. Indien u op knop E drukt bedient u de topswing naar u toe. Als u op knop F drukt gaat de topswing weer naar zijn neutrale stand. U kunt de knop loslaten op elk moment zodat u zelf kiest voor de voor u optimale stand.



3. Gebruik van de accu (optie)

3.1 Eerste keer opladen voor eerste gebruik

De accu minstens 8 tot 12 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. Om de levensduur van de accu te optimaliseren, is het van belang de oplader na het laden van het oplaadpunt los te koppelen.

3.1.1 De oplader nooit continu aan de accu aangesloten laten.

3.2 Gebruik van de accu

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af, de gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en de gebruiksfrequentie. De accu geeft door middel van een pieptoon aan wanneer deze moet worden opgeladen.

3.3 Het opladen van de accu

- a. Altijd eerst de adapter/lader aansluiten op het accu/oplaadpunt. Daarna pas de stekker van de adapter/lader in het stopcontact steken. Het oplaadpunt is te vinden in de motorzak (links inzittend).
- b. De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 8 en 12 uur.
- c. Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op netstroom/stopcontact aangesloten is.
- d. Tijdens het laadproces is de relaxfauteuil normaal te gebruiken.
- e. Na het laadproces eerst de stekker van de adapter/lader uit het stopcontact halen, en daarna de adapter/lader loskoppelen van het accu/oplaadpunt.



3.4 Algemene gebruikshandleiding accu

- a. Belangrijk: bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) dient u, in een warme kamer de accu tenminste 1 uur op kamertemperatuur laten komen.
- b. De accu mag niet opgeladen worden bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden.
- c. Gebruik de accu en oplader uitsluitend in droge en geventileerde ruimtes.
- d. Uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/lader gebruiken.
- e. Het gebruik van een verlengkabel is af te raden.
- f. De accu en adapter/lader mogen nooit met een beschadigde kabel of stekker worden gebruikt.
- g. De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden, dus niet laten vallen, stoten, of aan sterke vibraties blootstellen.
- h. Als de accu of adapter/lader beschadigd zijn mogen deze niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw leverancier van de fauteuil om de beschadigde onderdelen te laten vervangen.
- i. Accu niet aan open vuur blootstellen, of deze demonteren/openen.
- j. Accu niet in water onderdompelen.
- k. Buiten het bereik van kinderen houden.

3.5 Milieu

Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Belangrijk: De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te worden opgeladen.

Garantie accu en oplader: 1 jaar

4. Bekleding

4.1 Leder

Indien u gekozen heeft voor leder volgen hier een aantal tips om zo lang mogelijk van uw fauteuil te kunnen genieten.

- a. Leer is een natuurproduct; kleine oneffenheden op het leer, zoals insectenbeten, nekplooien en kleine kleurverschillen onderstrepen de waarde van ons kwaliteitsproduct.
- b. Leer verkleurt (verbleekt) door langdurige blootstelling aan fel (zon) licht.
- c. Leer kan kleur afgeven onder invloed van extreme temperaturen, vocht, oplosmiddelen of zuren (huidzuren en medicijngebruik).
- d. Zweet en hoofdvet (afscheidingen van mensen) zijn ook producten die door de poriën van het leder (of op andere stoffen) kunnen dringen en zich vastzetten in het leder en manifesteren zich uiteraard op de belangrijkste raakpunten ervan, de hoofdsteun en de armleggers. Door aminozuren, die in dit vet of zweet mee uitgescheiden worden, kan het zijn dat leder plekken of soms zelfs kleurafgave vertoont en dit hangt af van persoon tot persoon en is niet altijd bij iedereen aanwezig.
- e. U kunt uw lederen fauteuil onderhouden door deze regelmatig af te stoffen en wekelijks met neutraal water en een doek zonder zeepresten schoon te maken. Slechts eens per jaar kunt u de fauteuil met een speciale cleaner reinigen en daarna het leer voeden met een conditioner. Uw winkelier kan u hierover adviseren.
Bij behandeling met verkeerde onderhoudsmiddelen vervalt onherroepelijk de garantie.
- f. Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder belasting, mede door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zit. Dit is een geheel normaal verschijnsel. U kunt de zitspiegel beperken door dagelijks de zit “glad” te strijken met uw handen. Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels worden ook wel leefplooien genoemd. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds mooier wordt!



4.2 Stof

- a. Zuig het meubel wekelijks uit met een zogenaamd meubelmondstuk (kleine zanddeeltjes zorgen voor een schurende werking waardoor de stof versneld zal slijten).
- b. Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na verloop van tijd in meer of mindere mate. Katoenen stoffen zijn hier gevoeliger voor dan wollen stoffen. Over het algemeen verkleuren lichtere stoffen minder dan donkere kleuren. Het beste is om direct zonlicht op meubels zoveel mogelijk te vermijden.
- c. Gestoffeerd op een bepaald model gedragen niet alle stoffen zich hetzelfde. Dit heeft vooral te maken met de rekbaarheid van de verschillende stoffen. Hoe minder elastisch de stof is, hoe duidelijker plooien zichtbaar worden op de fauteuil en bij de stiknaden.

4.3 Schuimstoffen

Het zitmeubel past zich aan uw lichaamsvorm aan.

Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij comfortzitmeubelen is dat juist omgekeerd. De schuimproducten passen zich langzaam aan, aan de gebruiksomstandigheden, zoals de dagelijkse gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht. De aanpassingsduur zal afhankelijk van het gebruik tot 6 maanden na ingebruikname kunnen duren. Na deze gebruikperiode is het maximale comfortniveau bereikt.

Polyurethaan-foam.

Polyurethaan-foam is de grondstof die voornamelijk het comfort bepaalt. In Nederland wordt dit product ook vaak koudschuim genoemd. Het materiaal is niet giftig, wordt CFK vrij geproduceerd en is recyclebaar. Een eigenschap van koudschuim is dat het aanvankelijk stug is, maar in het gebruik elastischer wordt. De stugheid daalt met ongeveer 15%, op dit niveau stabiliseert het materiaal zich.

4.4 Algemeen

- a. Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn daardoor onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke productie van uw fauteuil(s).
- b. Doordat een relaxfauteuil uit vele bewegende delen bestaat is het bijna niet mogelijk het systeem te verstellen zonder enig geluid. Deze geluiden en “kraakjes” kunnen zowel bij het verstellen van de fauteuil als in de neutrale stand hoorbaar zijn. Kraakjes kunnen ook veroorzaakt worden doordat de fauteuil op een niet vlakke ondergrond is geplaatst.
- c. Verdeel uw gewicht over de zitting en de rug. Toch zal het zo kunnen zijn dat u meer naar rechts of meer naar links in uw fauteuil zit. Wees er dan ook van bewust dat u fauteuil gaat “meebewegen”. Het kan daardoor zo zijn dat de hoes van uw fauteuil meer naar rechts of meer naar links (dus schuin) op de rug gaat liggen. De fauteuil vormt zich naar de gebruiker.
- d. Gebruik armleggers niet als trapje, opstapje of zitplaats.
- e. De zitplaats is ongeschikt om er op te staan. De vering wordt daar dan plaatselijk overbelast.
- f. Ga nooit met de knieën op de zitting over de rug heen kijken.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar uw winkelier of kijk op onze website: www.de-toekomst.nl

Gebrauchsanleitung für Ihren Relaxstuhl mit Aufsteh-hilfe

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Relaxstuhls. Nach dem Lesen der vorliegenden Anleitung wünschen wir Ihnen viel Relax Komfort und -Vergnügen mit Ihrem Stuhl. Lesen Sie vorliegende Anleitung vor dem Gebrauch des Stuhls bitte vollständig und aufmerksam durch.

1. Erstmaliger Gebrauch des Stuhls

1.1 Aufstellung

- a. Der Stuhl muss auf geradem Boden aufgestellt werden
Bitte beachten Sie vor der Aufstellung des Stuhls die Beschaffenheit Ihres Bodens. Bei kratzerempfindlichen Böden empfiehlt es sich, Filzgleiter unter den Stuhlfuß zu kleben, um Schäden zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für durch den Stuhl entstandene Schäden am Boden. Heben Sie Ihren Stuhl NIE an den Armlehnen hoch. Zum versetzen des Stuhls diesen an der Unterseite der Armlehnen oder den Seitenwänden hochheben.
- b. Haben Sie sich für einen Stuhl mit Akku entschieden, dann müssen Sie diesen nach dem Auspacken des Stuhls aufladen. In Abschnitt 3.3 lesen Sie, wie Sie den Akku aufladen können.
- c. Ist Ihr elektrisch verstellbarer Stuhl mit einem Trafo ausgestattet, dann schließen Sie diesen direkt an den Stuhl an und stecken anschließend den Stecker in die Steckdose.
- d. Setzen Sie Ihren Stuhl nicht direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie ihn nicht in die Nähe eines offenen Kamins/Holzofens, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

1.2 Sicherheit

Achten Sie beim Bedienen des Stuhls darauf, dass die Körperteile wie Arme und Beine o.ä. von Kindern und Haustieren nicht durch bewegliche Teile eingeklemmt werden. Lassen Sie NIEMALS Kinder unbeaufsichtigt den Stuhl bedienen oder damit spielen!

2. Bedienung des Stuhls

Zweimotoriges Relaxsystem

Wenn Sie in neutraler Stellung auf die Taste A drücken und diese gedrückt halten, wird die Rückenlehne nach hinten bewegt. Durch Betätigung der Taste B bedienen Sie die Fußstütze unabhängig von der Rückenlehne. Drücken Sie Taste C, um die Rückenlehne wieder in die neutrale Stellung zu bringen. Drücken Sie auf Taste D, um die Fußstütze wieder einzuklappen. Betätigen Sie Taste D zur Bedienung der Aufsteh-Hilfe. Drücken Sie Taste B, um von der Aufsteh-Stellung wieder in die neutrale Stellung zu wechseln.





WICHTIG: Stellen Sie jederzeit sicher, dass Sie den Sessel komplett in die neutrale Stellung (mit den Seiten zum Boden gerichtet) bringen, bevor Sie sich in den Sessel setzen oder sorgen Sie dafür, dass sich der Sessel vor der Benutzung völlig in der Aufsteh-Stellung befindet. Setzen Sie sich nicht in den Sessel, solange dieser noch über dem Boden "schwebt". Hierdurch können schwere Schäden am System und an den Motoren verursacht werden!

2.3 Topswing

2.3.1 Topswing manueel

Ihr Sessel bietet auch eine Topswing-Funktion. Dies bedeutet, dass Sie die verstellbare Kopfstütze, wenn Sie in Ihrem Sessel sitzen, mit beiden Händen hinter Ihrem Kopf nach vorne ziehen können. Die Topswing-Funktion der Kopfstütze ist stufenlos einstellbar. Wenn Sie die Kopfstütze nicht mehr benötigen, drücken Sie diese einfach wieder mit beiden Händen oder durch Kopfdruck zurück. Bei Aktivierung der Topswing-Funktion steht der Sesselbezug an der Rückseite etwas nach oben über. Dies ist normal und lässt sich nicht vermeiden.

2.3.2 Elektrischer Topswing

Wenn Sie beim Kauf Ihres Sessels einen elektrischen Topswing gewählt haben, wird dieser von einem Motor betrieben. In diesem Falle verfügt Ihre Handbedienung über eine zusätzliche Taste. Drücken Sie auf die Taste E, um den Topswing in Ihre Richtung zu ziehen. Drücken Sie auf Taste F, um den Topswing wieder in die neutrale Stellung zu bringen. Sie können die Taste loslassen, sobald die für Sie optimale Stellung erreicht wurde.



3. Akku gebrauch

3.1 Laden vor dem ersten Gebrauch

Wenn Sie den Sessel erhalten, ist der Akku vorgeladen. Dieser Akku sollte dann DIREKT mindestens 8 Stunden aufgeladen werden.

Damit die Lebensdauer des Akkus erhalten und optimiert wird, ist es von Bedeutung, das Akkuladegerät nach dem Ladevorgang zu entfernen.

- 3.1.1** Bitte lassen Sie NIEMALS dauerhaft das Kabel als Verbindung zwischen Steckdose und Sessel. Dies konnte auch zu Beschädigungen an der Elektrik führen.

3.2 Gebrauch des Akkus

Durch die motorische Nutzung des Sessels nimmt die Kapazität des Akkus ab. Die Lebensdauer des Akkus hängt von mehreren Faktoren wie z.B. Nutzungsintensität, Umgebungstemperatur und der Belastung ab. Der Akku meldet sich mit einem Piepston, dass er aufgeladen werden muss.

3.3 Aufladen des Akkus

- a. Schließen Sie immer erst den Adapter/das Ladegerät an den Akku/Ladepunkt an. Stecken Sie erst danach den Stecker des Adapters/Ladegeräts in die Steckdose. Der Ladepunkt befindet sich in der Motortasche (links innen).
- b. Die Ladezeit ist abhängig von der Restkapazität des Akkus. Die Ladezeit sollte aber immer 6– 8 Stunden sein.
- c. Die grüne LED zeigt lediglich den korrekten Anschluss des Lade-Netzteils an.
- d. Während des Ladevorgangs können Sie dem Relaxsessel normal benutzen.
- e. Wenn das Aufladen abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und dann aus der Buchse am Sessel.

3.4 Allgemeines Bedienungsanleitung

- a. Der Akku sollte bei Gebrauch und beim Laden am besten Raumtemperatur haben.
- b. Der Akku soll nicht geladen werden bei Temperaturen unter 0 und über 40 Grad.
- c. Verwenden Sie den Akku nur in trockenen und belüfteten Räumen.
- d. Verwenden Sie nur das Original-Akku, Kabel und Ladegeräte.
- e. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
- f. Akku und Ladegerät mit einem beschädigten Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.
- g. Die Batterie äußerst sorgfältig benutzen, also nicht fallen lassen, stoßen oder starken Vibrationen aussetzen.
- h. Wenn Batterie oder Adapter/Aufladegerät beschädigt ist, darf diese nicht mehr benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Sessels in Verbindung, damit die beschädigten Teile ersetzt werden können.
- i. Batterie keinen offenen Flammen aussetzen oder sie demontieren/öffnen.
- j. Die Batterie nicht in Wasser tauchen.
- k. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

3.5 Umwelt

Bitte entsorgen Sie den Akku nach dem Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn in einer öffentlichen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.

Wichtig !!!: Der Akku sollte auch bei wenig oder keinem Gebrauch mindestens alle drei Monate wie oben beschrieben vollständig aufgeladen werden um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten.

Garantie Akku und Ladegerät : 1 Jahr

4. Bezug

4.1 Leder

Sollten Sie einen Sessel in Lederausführung gewählt haben, nachfolgend einige Tipps, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Sessel haben.

- a. Leder ist ein Naturprodukt; kleine Unebenheiten im Leder, beispielsweise verursacht durch Insektenbisse, ein etwas faltiges Erscheinungsbild oder kleine Farbunterschiede sind Beweise für die Hochwertigkeit unseres Qualitätsprodukts und ist kein Reklamationsgrund.
- b. Leder verfärbt sich (verbleicht), wenn es längere Zeit hellem (Sonnen-)Licht ausgesetzt ist.
- c. Leder kann bei extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, bei Aufbringung von Lösungsmitteln oder Einwirkung von Säuren (auch von durch die Haut abgegebenen Säuren oder von wegen Medikamenteneinnahme abgegebenen Stoffen) abfärben.
- d. Schweiß und Kopffett (menschliche Absonderungen) sind ebenfalls Produkte, die in die Poren vom Leder (oder anderen Stoffen) eindringen und sich im Leder festsetzen können. Diese Gefahr besteht natürlich an den wichtigsten Berührungspunkten, der Kopfstütze und den Armlehnen. Durch Aminosäuren, die in diesem Fett oder Schweiß mit abgesondert werden, können Flecken oder sogar Verfärbungen auf dem Leder entstehen. Dies ist personenabhängig und ein Problem, das nicht unbedingt bei jedem Menschen auftritt.
- e. Sie können Ihren Ledersessel am besten pflegen, indem Sie ihn regelmäßig entstauben und jede Woche einmal mit neutralem Wasser und einem Tuch ohne Seifenreste reinigen. Es empfiehlt sich, den Ledersessel nur einmal im Jahr mit einem Spezialreiniger zu säubern und danach ein geeignetes Pflegemittel aufzutragen. Ihr Leder-Fachhandel kann Sie diesbezüglich entsprechend beraten.
Bei unsachgemäßer Behandlung mit ungeeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln verfällt die Garantie unwiderruflich.
- f. Durch den Gebrauch des Sessels zeigen sich Gebrauchsspuren auf den Stellen, auf denen Sie sitzen. Leder dehnt sich bei Belastung, u.a. auch durch die Elastizität des darunter verarbeiteten Schaumstoffes. Der sogenannte Sitzspiegel zeichnet sich auf der Sitzfläche ab. Dies ist völlig normal. Sie können jedoch die Bildung eines Sitzspiegels einschränken, indem Sie jeden Tag die Sitzfläche mit Ihren Händen "glattstreichen". Auch auf der Rückenlehne werden Gebrauchsspuren sichtbar, da der Sessel ja benutzt wird. Diese Dehnungstreifen werden auch als "lebendige Falten" bezeichnet, die den Charakter des Leders unterstreichen. Leder ist ein fantastisches Material, das mit der Zeit durch den Gebrauch immer schöner wird!



4.2 Stoffbezug

- a. Saugen Sie das Möbelstück wöchentlich ab und benutzen Sie hierfür einen für Möbel geeigneten Staubsaugeraufsatz (kleine Sandteilchen sorgen nämlich ansonsten für eine leichte Scheuerwirkung, wodurch der Stoff schneller verschleißt).
- b. Unter Sonnenlichteinwirkung verfärbt sich jeder Stoff mit der Zeit mehr oder weniger stark. In der Regel sind Baumwollstoffe diesbezüglich anfälliger als Wollstoffe. Im Allgemeinen verfärben sich hellere Stoffe weniger stark als dunkelfarbige Stoffe. Es empfiehlt sich, die Einwirkung von direktem Sonnenlicht auf Möbeln nach Möglichkeit zu vermeiden.
- c. Bei mit Stoff bezogenen Möbeln bestimmter Modelle verhalten sich nicht alle Stoffe in gleicher Weise. Dies ist vor allem auf die unterschiedliche Dehnbarkeit der verschiedenen Stoffe zurückzuführen. Je geringer die Elastizität des Stoffes ist, umso schneller werden Falten auf der Sesselsitzfläche und an den Nähten sichtbar.

4.3 Schaumstoffe

Das Sitzmöbel passt sich Ihren Körperformen an.

Auf einer harten Oberfläche muss der Körper sich an das Möbelstück anpassen. Bei Komfortmöbeln verhält es sich umgekehrt. Die Schaumprodukte passen sich langsam an: an die Gebrauchsumstände, wie die tägliche Gebrauchsdauer, die Temperatur und das Körpergewicht.

Die Anpassungsdauer kann abhängig von der Nutzung bis zu 6 Monate nach Ingebrauchnahme betragen. Nach dieser Benutzungsdauer ist das höchste Komfortniveau erreicht.

Polyurethanschaum.

Polyurethanschaum ist die Komponente, die vor allem komfortbestimmend ist. In den Niederlanden wird dieses Produkt auch oft Kaltschaum genannt. Das Material ist nicht giftig, wird FCKW frei produziert und ist recycelbar. Eine Eigenschaft von Kaltschaum ist, dass er anfangs hart ist, aber durch den Gebrauch elastisch wird. Die Härte sinkt um ungefähr 15 %, auf diesem Niveau stabilisiert sich das Material.

4.4 Allgemeines

- a. Jeder Sessel wird mit der größtmöglichen Sorgfalt angefertigt. Die Anfertigung eines Sessels ist und bleibt menschliche Handarbeit. Daher ist auch jeder Sessel anders. Kleine Unterschiede im Erscheinungsbild sind hierdurch unvermeidlich und stellen die handwerkliche Qualitätsfertigung
- b. Da ein Relaxsessel aus vielen beweglichen Teilen besteht, ist es fast unmöglich, das System ohne jegliches Geräusch zu verstellen. Diese Geräusche und dieses „Knarren“ können sowohl beim Verstellen des Sessels als auch in der neutralen Position hörbar sein. Wenn der Sessel auf einem nicht ganz ebenen Untergrund steht, kann dies ebenfalls ein Knarren durch Schrägstellung verursachen.
- c. Verteilen Sie Ihr Gewicht über den Sitz und die Rückenlehne. Es kann sein, dass Sie Tendenz haben, Ihren Körper beim Sitzen mehr nach rechts oder nach links in Ihrem Sessel zu verlagern. Ihnen sollte bewusst sein, dass Ihr Sessel sich „mitbewegt“. Somit kann es sein, dass der Überzug Ihres Sessels sich auf der Rückenlehne ebenfalls mehr nach rechts oder links verlagert. Der Sessel passt sich dem Benutzer an.
- d. Benutzen Sie die Armlehnen nicht als Leiter, Trittbrett oder Sitzplatz.
- e. Der Sitz eignet sich nicht zum Darauf stellen. Die Feder wird dann stellenweise überlastet.
- f. Knien Sie sich nie auf die Sitzfläche, um über die Rückenlehne zu schauen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Website: www.sittingvision.com