

Van der Mark
ZORGHULPMIDDELEN



VAN DER MARK ZORGHULPMIDDELEN

DEMONTEREN

Van der Mark zorg hulpmiddelen



Handleiding demonteren hooglaagbed

STAPPEN



DEMONTEREN HOOG/LAAG BED - VAN DER MARK AD-SYSTEMEN

In deze handleiding staat ugelegd hoe u het bed kunt demonteren.
Graag stap voor stap uitvoeren middels de handleiding welke na deze pagina begint en met afbeeldingen wordt toegelicht.

- | | |
|---|---|
| 1. ONDERDELEN
Middels de handbediening | 6. VERDER SCHUIVEN
2 losse delen |
| 2. VLEUGELMOEREN
Onder het bed | 7. FOTO
Deel van hooglaagbed |
| 3. UIT ELKAAR SCHUIVEN
Tot circa 10 cm | 8. KANTELEN
Schot plat op de vloer |
| 4. PLANKEN
Deze haal je uit het bed | 9. VLEUGELMOEREN
Andere 2 losschroeven |
| 5. STEKKERS
3 van de 5 | 10. FRAME
Beide kanten |

STAP 1




Stap 1:

Zet alle onderdelen van het bed maximaal naar beneden. Dit kunt u doen door middel van de knoppen op de handbediening. Als het hele bed, inclusief het hoofd- en voeteneinde, omlaag staat bent u klaar om het bed te demonteren. Allereerst kunt u de papagaai uit het bed tillen.



STAP 2

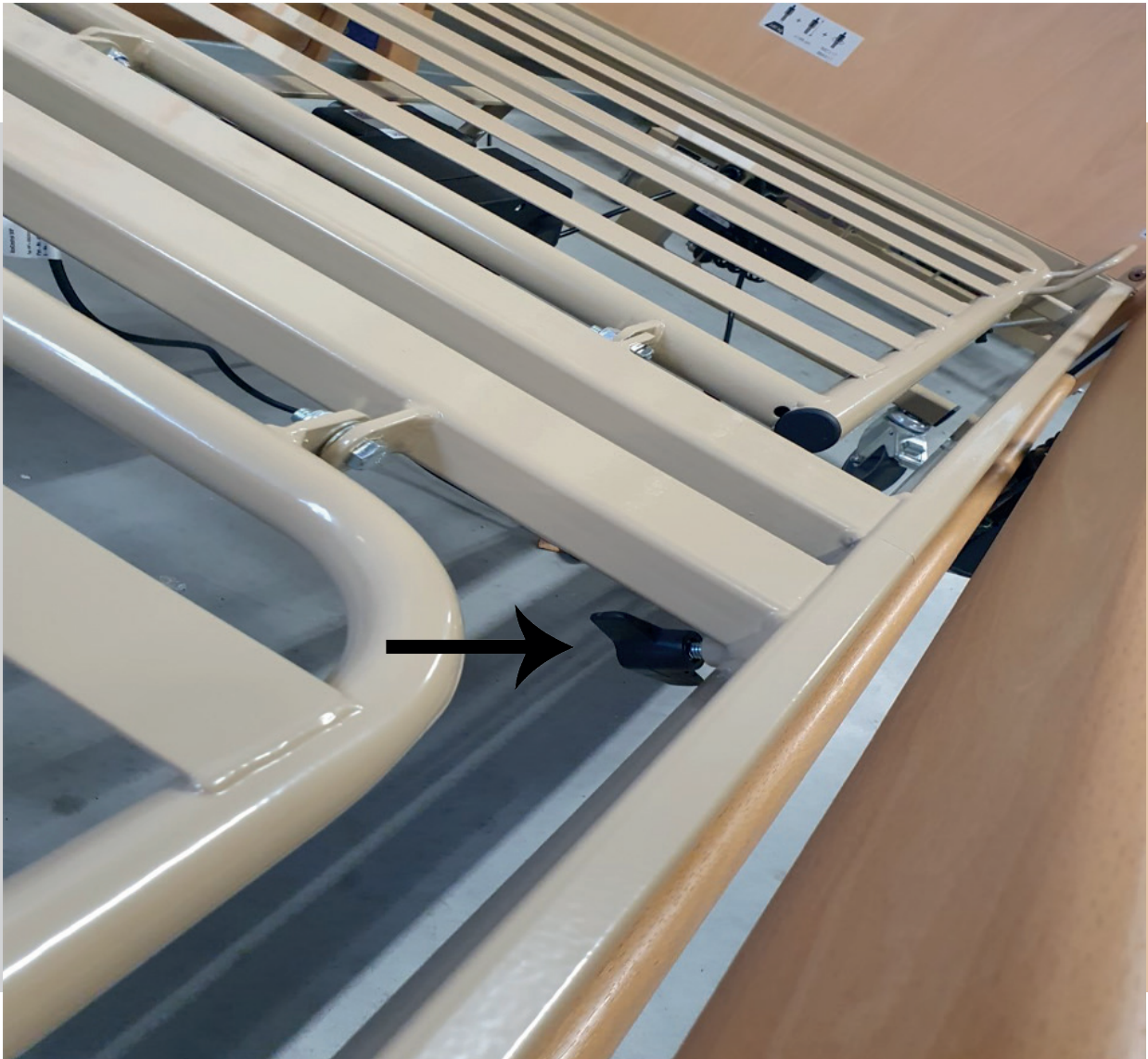

Stap 2

Onder het bed zitten in totaal 6 vleugelmoertjes. Allereerst schroeft u de middelste 2 vleugelmoeren van het bed los. U hoeft ze er niet helemaal uit de halen, zolang de vleugelmoeren maar ver genoeg losgedraaid zijn.

STAP 3



Stap 3


Zodra u de 2 middelste vleugelmeurtjes uit stap 2 ver genoeg open heeft gedraaid, kunt u het midden van het bed uit elkaar schuiven, zoals aangegeven op bovenstaande afbeelding. Schuif deze ongeveer 10 centimeter uit elkaar zodat u evenveel ruimte overhoudt zoals de afbeelding hierboven laat zien.

STAP 4




Stap 4

Als het midden van het bed ver genoeg uit elkaar geschoven is, zoals aangegeven bij stap 3, dan kun u de planken 1 kant op schuiven (zie peil op de afbeelding), zodat deze uit het bed gehaald kunnen worden. Als u de plank 1 kant opschuiven, dan willen de pinnen eruit zoals u kunt zien op de foto.

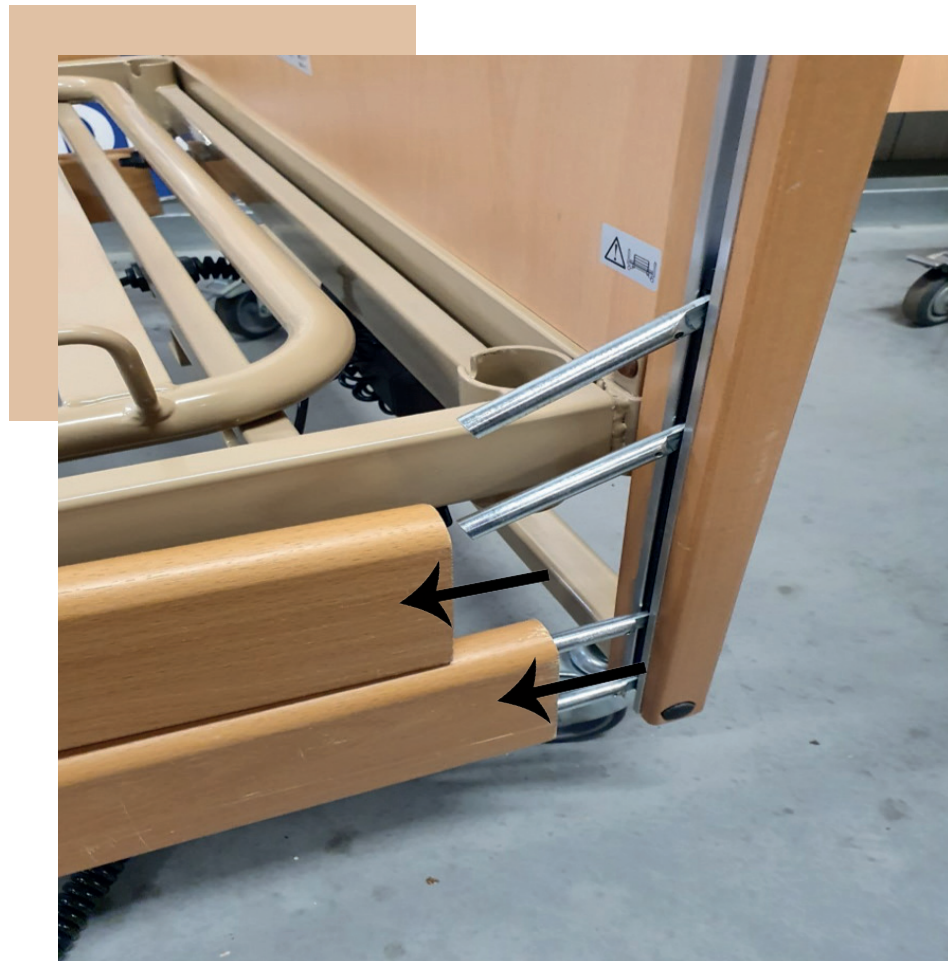

Stap 5

Nu de planken eruit gehaald zijn kunnen de stekkers makkelijk losgemaakt worden van de hoofdmotor. In de hoofdmotor zitten in totaal 5 stekkers. Slecht 3 hiervan hoeven eruit gehaald te worden. Met pijltrjes staat op de afbeelding hiernaast aangegeven welke dit zijn. De kabel van de handbediening en die van de hoofdmotor kunt u laten zitten. De kabels van de schotten en de kleine motot moeten er dus wel uit. Let op: ze kunnen er soms moeizaam uit gaan.

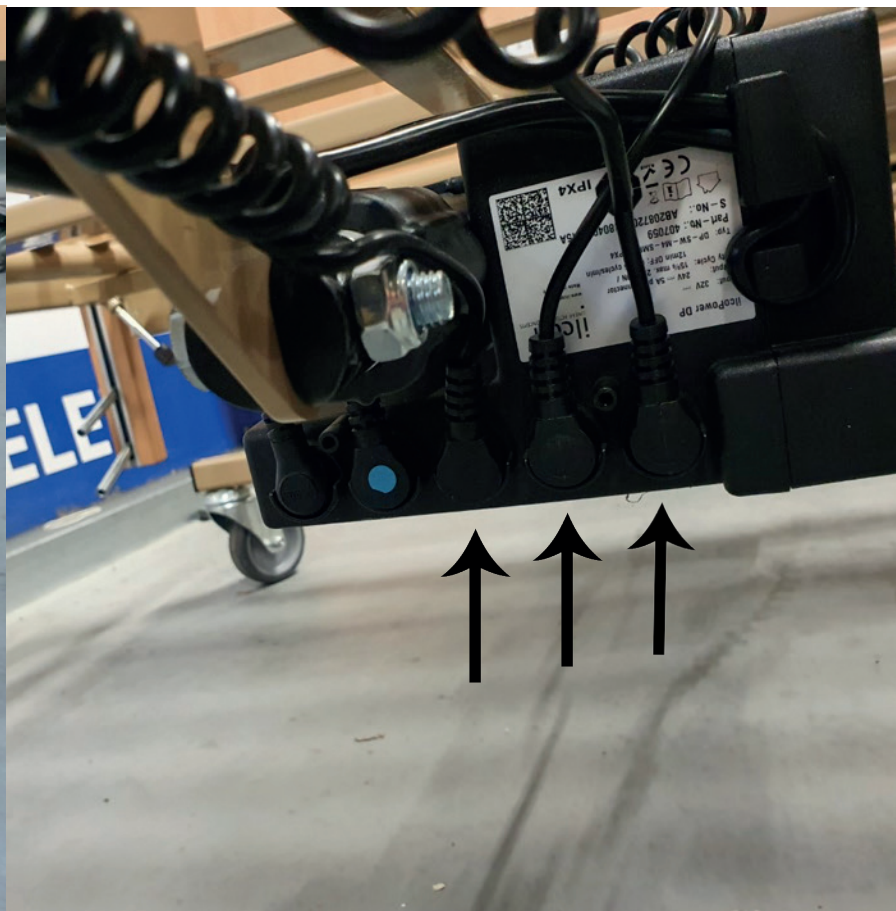

STAP 5

STAP 6



Stap 6

Nu de kabel van de motoren los zijn, kunt u het bed rustig in het midden verder uit elkaar schuiven zodat u 2 delen overhoudt. Zie stap 7 hoe deze stap eruit komt te zien.



STAP 7



Stap 7

Wanneer u stap 6 juist uitgevoerd heeft, houdt u 2 delen van het bed over zoals op de afbeelding hierboven aangegeven.



STAP 8

Stap 8


Het makkelijkste is nu om het bed te kantelen zodat het schot plat op de vloer komt te liggen. Wanneer u uw voet op de juist manier op het schot plaatst (zie afbeelding hierboven) kunt u het bed veilig kantelen.

STAP 9

Stap 9

Indien u stap 9 juist uitgevoerd heeft, kunt u de vleugelmoeren van de andere onderdelen ook losschroeven (zie pijltjes op de foto). Deze hoeven er dus helemaal niet uit.

Let op: op de volgende pagina vind u de laatste stap (stap 10) voor het demonteren van het hooglaagbed.

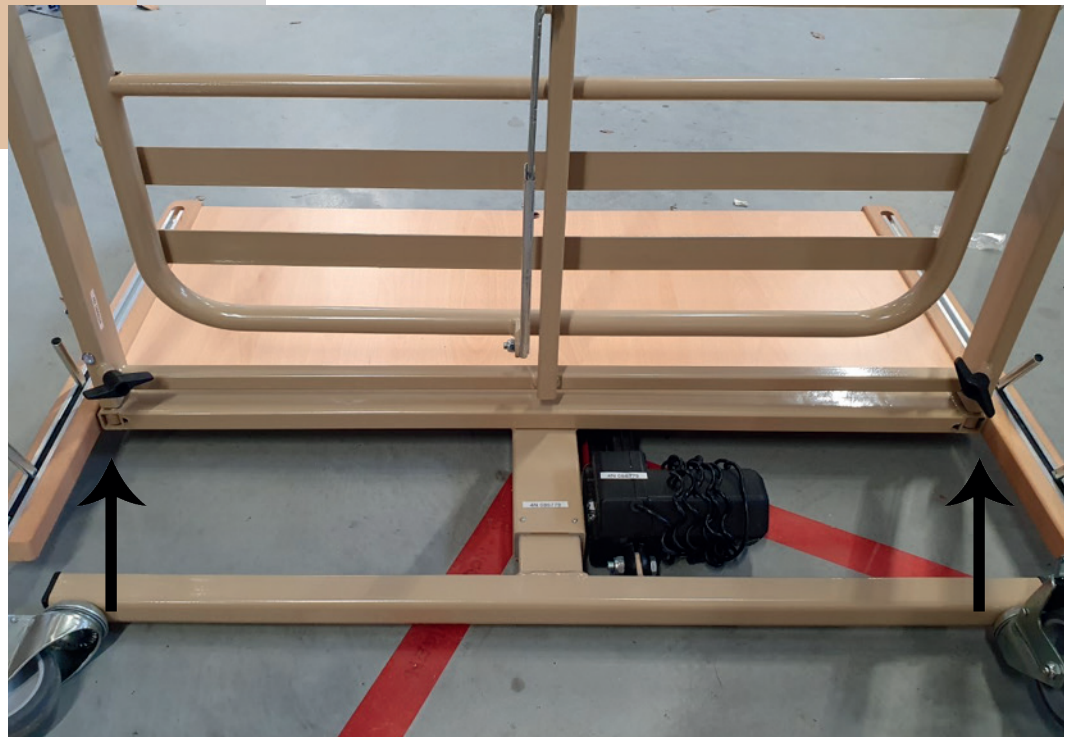

STAP 10

Stap 10

Wanneer u stap 9 juist heeft uitgevoerd, kunt u het frame van het schot af tillen zodat u 2 losse onderdelen krijgt zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast. Doe dit aan beide kanten. Nu heeft u nog 4 losse onderdelen en is het bed op de juiste manier gedemonteerd.

