

Days in hoogte verstelbare postool



Lees deze instructie goed door en bewaar die voor toekomstig gebruik

	Nieuwe code	Oude code
Days in hoogte verstelbare postool	09 130 9798	521A
Days in hoogte verstelbare postool met afneembare armleuningen	09 132 5828	521AD
Days in hoogte verstelbare postool met gevoerde toiletzitting	09 143 8993	11240

Beoogd gebruik

Postoelen bieden, of vergroten, onafhankelijkheid bij het toiletgebruik, doordat ze verminderde bewegingsvrijheid of een beperking compenseren.

Omschrijving

Moderne, fraaie postool die thuis of in een instelling comfort en stabiliteit biedt. Het gevoerde blauwe deksel en de vast te klemmen zwarte toiletzitting kunnen gemakkelijk worden verwijderd om schoon te maken. Het luxere model heeft een gevoerde blauwe toiletzitting die extra comfort biedt. De po met handgreep is gemakkelijk te verwijderen om die te legen. Doordat de postool in hoogte verstelbaar is, kan die afgesteld worden op de gewenste stand voor de gebruiker. Verkrijgbaar met en zonder afneembare armleuningen.

Gebruiksaanwijzing

1. Controleer voor gebruik of de postool stabiel op een vlakke horizontale ondergrond staat.
2. Als u de hoogte van de postool wilt aanpassen, verwijdt u de klemmen en schuift u de poot uit of in tot de gewenste stand. Controleer of alle poten even lang zijn en plaats de klemmen terug.
3. Plaats de po.
4. Klem de zwarte toiletzitting op de dwarsbalk achter. Controleer of de zitklemmen op de juiste plaats zitten. Voor het luxere model klemt u de blauwe gevoerde toiletzitting op de dwarsbalken voor en achter.
5. Bij model 521AD (09 132 5828) kunt u de armleuningen verwijderen door ze omhoog te trekken, waarna ze zijwaarts naar/van de postool verplaatst kunnen worden. Plaats de armleuningen voor gebruik terug en controleer of ze stevig vastzitten.

Onderhoud en schoonmaken

Schoonmaken doet u met een zachte doek, mild reinigingsmiddel en warm water. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Desinfecteren doet u zoals hierboven beschreven maar dan met een 1000 PPM chlooroplossing (Haz Tabs/voorschrift). U spoelt de postool na en droogt die af.



Waarschuwingen

- Deze postoolen mogen niet gebruikt worden bij een gewicht van meer dan 190 kg
- Controleer voor gebruik of de postool stabiel op een vlakke horizontale ondergrond staat
- De postool mag beslist niet worden verplaatst als er iemand op zit
- Trek de postool niet over de vloer
- Controleer voor elk gebruik of de klemmen, zitting en armleuningen juist gemonteerd zijn
- Controleer regelmatig de doppen om er zeker van te zijn dat de postool kan worden gebruikt

Maximaal
gebruikersge-
wicht

190 kg	419 lbs	30 st
-----------	------------	----------



521A



11240

Geproduceerd voor Patterson Medical Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, Verenigd Koninkrijk.

UK: Tel: 08444 124 330 Fax: 08448 730 100

www.pattersonmedical.co.uk

International: Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Patterson Medical Products, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938

Tel: 1-800-323-5547 Telefax: 1-800-547-4333

Patterson Medical Australia

PO Box 1006, North Ryde, NSW Australië 2113.

Tel: 1300 473 422 Fax: 1300 766 473

Patterson Medical France

Kinetec SAS, Zone Industrielle de Montjoly,

11 Avenue de l'Industrie - CS 40712

08013 Charleville-Mézières Cedex, Frankrijk.

Tel: 03 24 52 61 15 Fax: 03 24 52 90 34

