


Gebruiksaanwijzing 2^e generatie & lichtgewicht Provo rollators

DIENBLAD

Klem het dienblad in de gaatjes in het zitje. Op het dienblad kunt u bijvoorbeeld uw thee- of koffiekopjes zetten, om deze veilig mee te nemen.

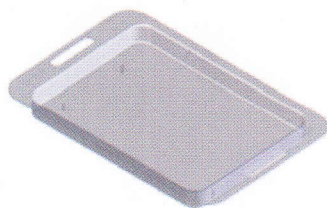

BOODSCHAPPENMAND



In de boodschappenmand kunt u makkelijk boodschappen mee nemen. U kunt de mand er zeer eenvoudig af halen om deze leeg te maken. Let op dat u bij het aanbrengen van de mand de remkabels niet knakt of klemzet. **Er mag maximaal 5 kg. Aan goederen in de mand vervoerd worden.**

BOODSCHAPPENVAK

Onder de mand bevindt zich het boodschappen vak. Op het boodschappen vak kunt u uw boodschappentas zetten als u de mand niet in gebruik heeft.

WANDELSTOK- EN ELLEBOOGKROK-HOUDER



In de wandelstok- en elleboogkrukhouder kunt u eventueel uw wandelstok of elleboogkruk plaatsen. De houder is geschikt voor wandelstokken of elleboogkrukken met een diameter van 18 tot 22 mm.

OPBERGEN EN VERVOEREN

Haal het dienblad en de mand van de Provo rollator af en u kunt de rollator inklappen door de opklapbeveiliging in te drukken. Trek de horizontale stang onder het zitje, in zijn geheel omhoog. Hiermee is de Provo rollator opgeklapt. (zie ook de automatische opklap beveiliging - verderop in de gebruiksaanwijzing)

VEILIG TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES

Alle, door Premis geproduceerde aanpassingen zoals Premis Onderarmschaalsteunen, Premis duwbeugels, Premis passieve remmen en Premis éézijdige remmen, zijn veilig te gebruiken accessoires (aanpassingen) op de Provo rollator. Ook Premis op maat gemaakte aanpassingen zijn veilig te gebruiken op de Provo rollator.

KLEUREN

De 2^e generatie Provo rollators in de kleuren metallic aubergine, metallic blauw, metallic champagne, metallic titanium, metallic wit met rode biezen en metallic zwart. De lichtgewicht rollatoren in de kleuren metallic champagne, metallic zilver, metallic titanium, metallic zwart en metallic wit met rode biezen.

REMKABELS & VERSTELLEN REMKABELS



Verstelling van de remkabels: Door de stelboutjes in het midden van de remkabel losser of vaster te draaien, zorgt u ervoor dat de remblokjes de banden op het juiste moment raken.

REMKABELGELEIDERS



De Provo rollator is voorzien van remkabel-geleiders (patent pending). De remkabels worden door deze geleiders binnen het frame gehouden zodat de remkabels niet achter obstakels kunnen blijven hangen. Let op dat u bij het aanbrengen van de mand de remkabels niet knakt of klemzet.



Automatische opklapbeveiliging

Controleer ALTIJD of de AUTOMATISCHE opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt.

Gebruiksaanwijzing 2^e generatie & lichtgewicht Provo rollators

WIELEN & BANDEN



Wiel 2^e generatie



Wiel lichtgewicht

Standaard is uw 2^e generatie Provo rollator met E-PU banden van 200 x 50 mm. uitgevoerd. De lichtgewicht Provo rollator is met E-PU banden van 200 x 30 mm. uitgevoerd. Premis E-PU banden zijn volledig onderhoudsvrij.

Als uw Provo rollator met luchtbanden is uitgevoerd dan is het van belang dat u de luchtbanden op de juiste spanning houdt. Door te zachte banden werken de remmen niet optimaal of de Provo rollator naar links of rechts trekt. Deze kunt u (laten) oppompen met het bijgesloten verloopnippeltje (het verloopnippeltje wordt ALLEEN bij Provo rollators met luchtbanden meegeleverd). Dit verloopnippeltje schroeft u op het ventiel. Nu kunt u met een fietspomp de band oppompen. Hierna dient u het verloopnippeltje van het ventiel af te schroeven en weer op te bergen. Indien vuil aan de banden koekt, dient u dit met een borsteltje te verwijderen.

AUTOMATISCHE OPKLAPBEVEILIGING VOOR DE ALLE PROVO ROLLATORS.



Controleer **ALTIJD** of de **AUTOMATISCHE** opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt.


DE ROLLATOR INKLAPPEN.

Als u de rollator wilt inklappen, druk dan de rode opklapbeveiliging aan de **rechterkant** in terwijl u het hendeltje ingedrukt houdt.

Let erop dat u niet met uw vingers tussen het frame en de beveiliging klem komt te zitten.



VEILIG. Dit is de manier om de rollator in te klappen

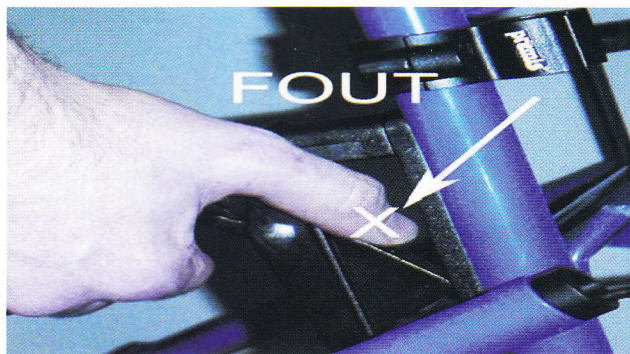

ONVEILIG: Op deze manier loopt u het risico om met uw vingers in de beveiliging vast te komen zitten. Doe dit dus niet!

INSTELLEN HANDGREEP HOOGTE



Instellen hoogte en stand van de handgrepen.

Draai de fixatie hendel onder de handgreep los. Trek de duwbuizen omhoog tot de gewenste hoogte, maximaal tot het gladde deel van de duwbuis, echter tot de markering maximum (zie pijl op de linker foto hier naast), het gladde deel mag niet zichtbaar zijn.

Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden.

Gebruiksaanwijzing 2^e generatie & lichtgewicht Provo rollators

OPPERVLAKTE KLEUR COATING

Alle Provo rollators zijn van een, slagvaste, 3 laagse metallic lak finish voorzien. Bij mechanische beschadigingen kunt u, de beschadiging, met aantipverf in de juiste kleur opvullen. Gelijk aantippen bij beschadigingen voorkomt roestvorming.

PARKEERREMMEN & ZITJE

Gebruik altijd de parkeerrem om te gaan zitten. Haal het dienblad van de rollator af. Als de rollator op de parkeerrem staat kan er niet meer met de Provo rollator gereden worden.

U kunt op het zitje gaan zitten. Houdt u zelf goed vast aan de handvatten als u gaat zitten. Doe dit ook bij het weer opstaan. Zorg er voor dat er altijd iemand in de buurt is om u na ongelukkige zitmanoeuvres te helpen.


Bij een Provo rollator met een Drukrem kan het zitje alleen gebruikt worden als de rollator Premis (loop)parkeerremmen heeft. De zithoogte zakt, bij het gaan zitten, een paar cm.

Alleen bij een Provo rollator met Druk- en parkeerremmen, kunt U veilig op het zitje zitten.

Zonder parkeerremmen kunt u het zitje niet gebruiken.

GEBRUIK van de REMMEN en PARKEERREMMEN

DE **RODE** PREMIS PARKEERREM

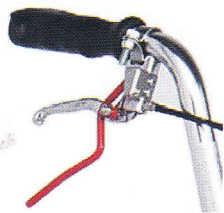

REMMEN: Om te remmen met de rode Premis Parkeerremmen. Knijp beide bovenste (zilverkleurige) handremmen in.

PARKEREN: Knijp de beide rode remhendels helemaal in tot deze vast klikken. Parkeerrem

ontgrendelen. Knijp de beide zilverkleurige handremmen helemaal in en laat deze weer los.

DE PREMIS LOOP-PARKEERREM

REMMEN: Om te remmen met de Premis Loop Parkeerremmen. Knijp beide zwarte handremmen in.



PARKEREN: Druk de zwarte hendels naar beneden tot deze vast klikken. Parkeerrem ontgrendelen.


Knijp de beide handremmen helemaal in en laat deze weer los.

DE PREMIS DRUKREM

REMMEN: Om te remmen met de Drukremmen. Oefen druk uit op de handvatten om te remmen. Gewicht gebruiken om volledig tot stilstand te komen.



STAND VAN DE HANDVATTEN

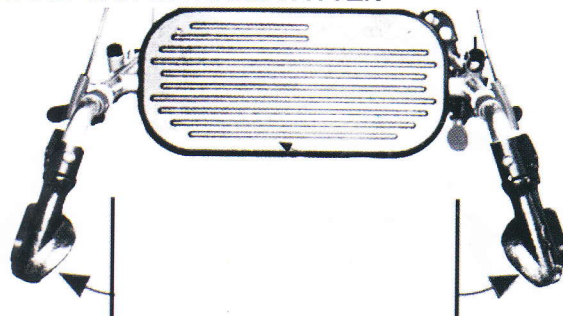

Voor een betere loophouding en meer comfort kunnen de handgrepen maximaal 15 graden naar buiten worden gedraaid (evenwijdig aan de stand van de fixatie hendel). Draai de fixatiehendel weer goed vast, zodanig dat de handgrepen niet meer bewogen kunnen worden.

ROLLATOR WEER GEBRUIKEN

Om de Provo rollator weer te gebruiken, knijpt u de de remmen in (zie gebruik van de remmen). Houdt de Provo rollator iets achterover en oefen enige druk uit op de handvatten. De Provo rollator komt nu weer op 4 wielen in de gebruiksstand. Laat de handremmen los.

JAARLIJKSE CONTROLE

Het verdient aanbeveling eens per jaar de draaiende delen te laten smeren, alle schroeven en moeren aan te laten draaien, de remkabels te laten controleren en af te stellen en de banden op slijtage te laten controleren. Hiermee blijft de goede werking van uw Provo rollator gegarandeerd.

De Provo rollator kan met een zachte vochtige doek schoon gemaakt worden, eventueel kan er een huishoudschoonmaakmiddel gebruikt worden. Schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen, de coating en de chroom laag van de handvatten aan.



Controleer **ALTIJD** of de **AUTOMATISCHE** opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt.

Gebruiksaanwijzing 2^e generatie & lichtgewicht

Provo rollators

KWALITEIT & KEURMERKEN

GQ-KEURMERK De Provo rollators voldoen aan de eisen
Goedgekeurd van de normen EN 12182, EN 1285 en
KBOH TNO EN-ISO 11199-2.



De Provo rollators, voorzien van Premis parkeer-remmen en Premis Loop parkeerremmen voldoen aan de KboH richtlijn L-01 en zijn GQ goedgekeurd.


Alle Provo rollators zijn voorzien van een CE label met relevante product informatie volgens onderstaand voorbeeld.



GEBRUIKTE MATERIALEN

Alle gebruikte materialen zijn te recycleren, vrij van PVC en vrij van giftige stoffen.

Alle Provo rollators zijn geschikt voor binnen en buiten gebruik.

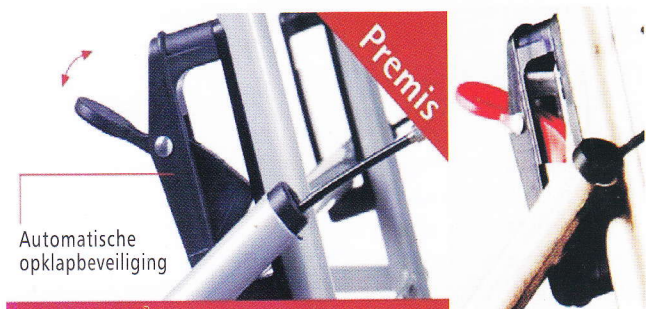

Controleer **ALTIJD** of de **AUTOMATISCHE** opvouwbeveiliging er op staat als U de rollator gebruikt.



PRODUCTNUMMERS, MATEN EN GEWICHTEN

OMSCHRIJVING PROVO ROLLATORS	artikelnummer	zit breedte	zit hoogte	Maximaal gebruikers gewicht	Gewichten in kg.				Handvat hoogte		Maximum breedte
					rollator	Mand	Dienblad	Totaal	van	tot	
Rollator licht gewicht	RO4943000	43 cm	62 cm	110 kg	8,6	0,75	0,4	9,75	80 cm	98 cm	59 cm
Rollator 2e generatie standaard breedte	RO4143000	43 cm	62 cm	120 kg	10,7	1	0,4	11,85	80 cm	98 cm	59 cm
Rollator 2e generatie extra breed	RO4150000	50 cm	62 cm	150 kg	13,0	1	0,4	14,4	80 cm	98 cm	67 cm
Rollator 2e generatie extra breed	RO4155000	55 cm	62 cm	150 kg	13,05	1	0,4	14,45	80 cm	98 cm	72 cm
Rollator 2e generatie extra breed	RO4160000	58 cm	62 cm	150 kg	13,1	1	0,4	14,5	80 cm	98 cm	75 cm
Rollator 3e generatie	RO4043000	43 cm	62 cm	100 kg	13,4	1	0,4	14,8	80 cm	98 cm	59 cm
Rollator kleine volwassenen	RO4737000	37 cm	49 cm	100 kg	10,2	1	Nee	11,2	67 cm	85 cm	55 cm
Rollator kleine volwassenen	RO4743000	43 cm	49 cm	100 kg	10,5	1	Nee	11,5	67 cm	85 cm	59 cm

De Nort 20 - 3931 NG Woudenberg
Telefoon: 033-2779191 - Fax: 033-2779190

Email adres: verkoop@premis.nl

Web site: www.premis.nl