

Gebruiksaanwijzing voor douchestoel

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing door voor gebruik.

1. Gebruik het artikel uitsluitend op een vlakke en vaste ondergrond.
2. Gebruik het artikel nooit als het maximumgewicht wordt overschreden.
3. Controleer voor gebruik of het artikel niet versleten is en of dat alle schroeven vast zitten.
4. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is.
5. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
6. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
7. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen



Versie	Douchestoel Vast
Artikel Nr.	03.W1600001001
Max gebruikersgewicht	100 kg
Zithoogte	36—46 CM
Totaal gewicht	< 10 kg