

## Gebruiksaanwijzing voor Toiletstoel, douchestoel

### Algemene gebruiksvoorschriften

1. Gebruik de stoel uitsluitend op een effen harde vloer.
2. Gebruik de stoel alleen binnenshuis.
3. De patiënt kan niet rechtop op de voetsteunen staan, de stoel kan daardoor kantelen.
4. Gebruik de stoel niet voor patiënten die het maximum toelaatbaar gewicht overschrijden.
  - a. De vaststaande stoel heeft een maximum toelaatbaar gewicht van 160 kg.
  - b. De verrijdbare stoel heeft een maximum toelaatbaar gewicht van 100 kg.
5. Controleer voor gebruik of het artikel niet versleten is en dat alle schroeven vast zitten.
6. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is.
7. Berg het artikel niet buiten op of in ruimten waar de temperatuur onder 0°C of boven 40°C is.
8. Houd het artikel schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen. Droog het artikel af met een zachte doek.
9. Onderhoud dient te geschieden door Van der Mark A.D. Systemen.

### Gebruik van een vaststaande stoel

1. Plaats de toiletstoel op de gewenste plaatst;
2. Verwijder de afdekplaat;
3. Controleer of de emmer goed bevestigd zit en de deksel is verwijderd;
4. De patiënt kan plaatsnemen.



### Specificaties Douche/Toiletstoel.

Maximale gebruikersgewicht	160 kg	Totale breedte	57,5 kg
Zitbreedte	43 cm	Totale diepte	52 cm
Zitdiepte	42 cm	Totale hoogte	82,5-97,5 kg
Zithoogte	42,5-57,5 cm	Breedte opening zitting	21,5 cm
Hoogte tot armsteunen	60,5-75,5 cm	Diepte opening zitting	25 cm
Breedte tussen armsteunen	43 cm	Hoogte tot onderkant zitting	34-49 cm
Totaal gewicht	4,8 kg	Stappen hoogteverstelling	25 cm