

Gebruikershandleiding traagschuim zitkussen

Antidecubitus kussen



Gegevens fabrikant
Textielbewerking VDM
Edisonstraat 7
3281NC Numansdorp
Nederland
+31 0186 57 35 85
www.textielbewerkingvdm.nl



Gegevens distributeur
Van der Mark Zorghulpmiddelen
Edisonstraat 7
3281NC Numansdorp
Nederland
+31 0186 57 35 85
www.vandermarkzorghulpmiddelen.nl



1 Inhoudsopgave

Deze handleiding dient te worden overhandigd aan de gebruiker van het product. Lees deze handleiding voor u het product gebruikt en bewaar hem voor eventuele raadplegingen in de toekomst.

1.	Algemeen	3
1.1	Algemene informatie	3
1.2	Uitleg over de symbolen in de gebruikershandleiding	3
2	Kwaliteit	4
2.1	Certificaten en normering medisch hulpmiddel	4
2.2	Etikettering medisch hulpmiddel	4
2.3	Garantiebepalingen	4
2.4	Levensduur	4
3	Beoogde doel en gebruik	5
3.1	Beoogde doel	5
3.2	Doelgroep	5
3.3	Beoogde gebruikers	5
3.4	Indicaties en contra-indicaties	5
3.4.1	Contra-indicaties	5
3.4.2	Bijwerkingen	5
3.5	Klinisch voordeel en prestatie-eigenschappen	5
4	Veiligheid	6
4.1	Aandachtspunten	6
4.2	Ongeluk of incident	6
5	Componenten	6
5.1	Productbeschrijving	6
6	Voorzorgsmaatregelen en gebruikersinstructies	7
6.1	Instructies vóór in gebruik name van het glijlaken	7
6.2	Gebruikersinstructies	7
6.3	Waarschuwingen glijlaken	7
7	Wasvoorschriften	7
8	Onderhoud	8
9	Na gebruik	8
9.1	Opslag	8
9.2	Hergebruiken	8
9.3	Retour zenden	8
9.4	Afvoeren	8

1. Algemeen

1.1 Algemene informatie

Lees alstublieft eerst deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gaat gebruiken. Let bij de installatie en het gebruik vooral op de waarschuwingen en andere veiligheidsvoorschriften. Als u de instructies niet volledig begrijpt gebruik het product dan niet maar neemt contact op met uw dealer. U kunt met uw vragen ook terecht bij Van der Mark Zorghulpmiddelen. Onze contactgegevens kunt u vinden op de 1^e pagina van dit document.

1.2 Uitleg over de symbolen in de gebruikershandleiding

In deze handleiding worden verschillende symbolen gebruikt. De betekenis van de gebruikte symbolen wordt hieronder toegelicht.



Symbool van de fabrikant van dit product. Bij dit symbool staan vaak de gegevens van de fabrikant vermeld.



Symbool van de CE markering.



Symbool van het serienummer van het hulpmiddel.



Symbool van het GTIN-nummer. Dit is het Global Trade Identification Nummer.



Symbool dat aangeeft dat u het product niet mag gebruiken als de verpakking is beschadigd



Symbool dat aangeeft dat u met oplettendheid het gebruik van dit product



Symbool dat aangeeft dat u eerst de gebruikshandleiding moet raadplegen voordat u het product gebruikt.



Symbool dat aangeeft dat het product een medisch hulpmiddel is.



Symbool dat aangeeft wat de productiedatum van het product is.

2 Kwaliteit

2.1 Certificaten en normering medisch hulpmiddel

Kwaliteit is een cruciaal aspect bij Van der Mark Zorghulpmiddelen. Onze organisatie borgt de kwaliteit o.a. door onze certificatie volgens de ISO13485:2016 norm.

Dit traagschuim kussen is voorzien van een CE-markering conform de Medische Hulpmiddelen Verordening (MDR 2017/745) voor medische hulpmiddelen

Neem voor meer informatie over het product contact op met Van der Mark Zorghulpmiddelen.

2.2 Etikettering medisch hulpmiddel

Dit glijlaken is een medisch hulpmiddel (voorbeeld label Z350)



2.3 Garantie bepalingen

Voor dit product geeft Textielbewerking VDM een fabrieksgarantie van 1 jaar. Textielbewerking VDM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door:

- Niet in acht nemen van de gebruikershandleiding.
- Verkeerd gebruik van het hulpmiddel.
- Normale slijtage.
- Technische aanpassingen die niet zijn uitgevoerd door Textielbewerking VDM of een door ons daartoe gemachtigde partij.

2.4 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is 2 jaar mits het product in strikte overeenstemming met het bedoelde gebruik wordt toegepast, en als aan alle onderhouds- en service eisen wordt voldaan.

De verwachte levensduur kan worden overschreden als het product voorzichtig wordt gebruikt en goed wordt onderhouden. De verwachte levensduur kan aanzienlijk worden verminderd door extreem of onjuist gebruik.

De verwachte levensduur vormt geen aanvullende garantie.

3 Beoogde doel en gebruik

3.1 Beoogde doel

Het traagschuim kussen is bedoeld ter preventie en/of behandeling van decubitus en het zorgdragen voor een goed zitcomfort. Uit onderzoek is gebleken dat antidecubitus zitkussens een druk reducerende werking hebben die zowel een preventieve als een curatieve werking hebben op decubitus.

3.2 Doelgroep

Het product kan worden ingezet in de intra- en extramurale zorg voor mensen met decubitus of risico's op de ontwikkeling van decubitus. Dit kan betekenen in de thuissituatie, in zorginstellingen of ziekenhuizen. Voor cliënten in de terminale of palliatieve fase is een verhoogd risico op het ontwikkelen van decubitus aanwezig en is dit zitkussen zowel preventief als curatief in te zetten.

3.3 Beoogde gebruikers

Dit product kan worden gebruikt door gebruikers van alle leeftijden met een maximaal gebruikersgewicht van 125 kg.

3.4 Indicaties en contra-indicaties

3.4.1 Indicaties

Dit product kan worden ingezet ter voorkoming of ter behandeling van decubitus.

3.4.2 Contra-indicaties

Er zijn op dit moment geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van dit hulpmiddel.

3.4.3 Bijwerkingen

Er zijn op dit moment geen bijwerkingen bekend bij het gebruik van dit hulpmiddel.

3.5 Klinisch voordeel en prestatie-eigenschappen

Het zitkussen bestaan uit twee verschillende lagen schuim. De onderste laag is een hoogwaardige vorm van ventilerend koudschuim. De bovenste laag bestaat uit traagschuim, dit neemt de vorm van het zitvlak vertraagd aan. Traagschuim heeft een druk verdelende werking en kan daarom worden ingezet ter preventie van behandeling van decubitus. Traagschuim biedt ook een hoog zitcomfort.

4 Veiligheid

4.1 Aandachtspunten

- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit product alleen wanneer u de meegeleverde gebruikershandleiding volledig hebt doorgelezen en begrepen. De gebruikershandleiding is beschikbaar via onze website. Als u vragen heeft of de instructies niet begrijpt neem dan contact op met uw dealer of met Van der Mark Zorghulpmiddelen.
- **WAARSCHUWING: NIET ROKEN** i.v.m. brandgevaar.
Een sigaret kan een gat branden in het zitkussen en schade veroorzaken. Wanneer u deze waarschuwing negeert, kan dit resulteren in een ernstige brand, schade aan eigendommen en fysiek letsel of de dood.
- Gebruik dit product in geval van decubitus op advies van een specialist.
- Er zijn geen aanbevolen omgevingsfactoren tijdens transport, gebruik en opslag.
- Controleer vóór gebruik het product op schade.
- Gebruik het product niet in geval van schade.
- Neem in geval van problemen of vragen contact op met uw dealer of Van der Mark Zorghulpmiddelen.

4.2 Ongeluk of incident

Neemt contact op met Van der Mark Zorghulpmiddelen als zich een ernstig voorval heeft voorgedaan met het hulpmiddel. Neem indien nodig ook contact op met de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker van het hulpmiddel is gevestigd.

5 Componenten

5.1 Productbeschrijving

Het traagschuim zitkussen is vervaardigd uit twee verschillende lagen schuim. De onderste laag is een hoogwaardige vorm van ventilerend koudschuim. De bovenste laag bestaat uit traagschuim, dit neemt de vorm van het zitvlak vertraagd aan.

Het traagschuim zitkussen heeft een hoog zitcomfort en een druk verdelende werking en kan daarom worden ingezet ter preventie of behandeling van decubitus.



6 Voorzorgsmaatregelen en gebruikersinstructies

6.1 Instructies vóór in gebruik name van het zitkussen

Het traagschuim zitkussen kan en mag door iedereen worden gebruikt mits onderstaande punten strikt worden opgevolgd. Als dit niet lukt of u twijfelt neem dan contact op met uw dealer of Van der Mark Zorghulpmiddelen.

- Het traagschuim wordt gebruiksklaar geleverd en hoeft niet eerst gereinigd te worden.
- Controleer het zitkussen op schade en gebruik het zitkussen niet in geval van schade.
- Controleer of de hoes goed past om het zitkussen en er geen oneffenheden zijn.

6.2 Gebruikersinstructies

De volgende punten zijn belangrijk bij het gebruik van het kussen.

- Gebruik het zitkussen alleen op zitvlakken waar het zitkussen volledig wordt ondersteund.
- Gebruik het zitkussen altijd met de traagschuim zijde naar boven.
- Indien het zitkussen is voorzien van een uitsparing: de uitsparing bevindt zich niet exact in het midden. Positioneer de uitsparing op de voor de gebruiker gewenste plaats.

6.3 Waarschuwingen zitkussen

- Gebruik geen scherpe voorwerpen in de buurt van het zitkussen.
- Rook niet wanneer u op het zitkussen zit.
- Wanneer u het zitkussen reinigt gebruik dan milde middelen (zonder alcohol).
- Plaats geen hete apparaten in de buurt van het zitkussen
- Maximaal gebruikersgewicht: 125kg.

7 Wasvoorschriften

De hoes is afneembaar en kan in de wasmachine worden gewassen op maximaal 95 °C.

De volgende reinigingsmiddelen zijn niet toegestaan:

- Chloor
- Producten met een hoge PH waarde, zoals ammoniak
- Oplosmiddelen, zoals ketonen en esters
- Overige sterke reinigingsmiddelen

Huishoudelijk wasmiddel is wel toegestaan.

U kunt het product niet strijken en niet bleken.

8 Onderhoud

Het wordt aanbevolen om het zitkussen regelmatig te controleren op schade zoals scheuren of gaatjes. Bekijk ook de kern van het kussen door de rits open te ritsen. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw dealer of Van der Mark Zorghulpmiddelen.

9 Na gebruik

9.1 Opslag

Voor de opslag van dit hulpmiddel gelden geen aanvullende voorwaarden.

9.2 Hergebruiken

Dit product is geschikt voor hergebruik. Hoe vaak het product kan worden hergebruikt hangt af van de frequentie en de intensiviteit van het gebruik.

Zorg er altijd voor dat het product is gereinigd voordat het bij een nieuwe patiënt wordt gebruikt.

9.3 Retour zenden

Huurt u het zitkussen? Neemt dan contact op met uw dealer.

9.4 Afvoeren

Het zitkussen kan via het normale huisvuil worden afgevoerd.